

חיבור חיישן ENLITE לגוף



MiniMed 640G




Medtronic

חיבור החיישן לגוף – פריטים

לפני החדרת החיישן, ודא שמונחים לפניך כל הפריטים הדרושים:



1. התקן **One-press Serter** על מנת להחדיר את החיישן כראוי.
2. חיישן **Enlite** מגיע באריזה נפרדת ומחובר למעמד פלסטיק ההכרחי להכנסה תקינה למכשיר ההחדרה.
3. מדבקה לחיישן דרושה כדי להבטיח שהחיישן יישאר במקומו.
4. משדר **Guardian™ 2 Link** מתחבר לאחר החדרת החיישן ומוצמד על ידי מדבקת הכיסוי

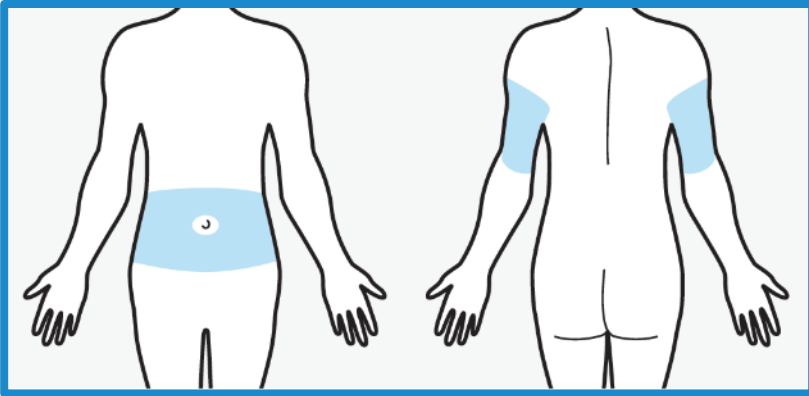

בחירת מקום ההחדרה

ניתן להחדיר את החיישן בכל אחד מהאזורים המוצגים שמוצגים כאן.

מקום ההחדרה של החיישן חייב להיות במרחק של לפחות:

- 5 סנטימטרים מהטבור
- 2.5 סנטימטרים מערכת העירוי של המשאבה
- 2.5 סנטימטרים מכל מקום הזרקה אחר

הימנע מהמקומות הבאים:

- היכן שהביגוד עשוי לשפשף את העור או להתכווץ (לדוגמה, קו החגורה).
- היכן שגופך מרבה להתכופף באופן טבעי, כיוון שזה עלול לגרום למשיכת החיישן החוצה.
- היכן שיש צלקות או רקמת עור קשה או סימני מתיחה.
- היכן שמתקיימת תנועה רבה או שקיים חיכוך.

חיבור החיישן לגוף


1

פתח את אריזת החיישן.
משוך את הפינה של כיסוי הנייר כדי
לפתוח את אריזת החיישן.




2

החזק את החיישן במעמד הפלסטיק.
הוצא את החיישן בעזרת המעמד
המחובר על-ידי החזקה במעמד
בלבד. הנח את החיישן והמעמד על
משטח נקי וישר (למשל, שולחן).

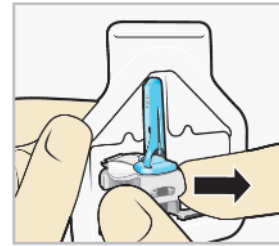



3

הכנס את לשונית המדבקה.
ודא שלשונית המדבקה של החיישן מוכנסת אל מתחת
למחבר החיישן ומוצמדת אליו.

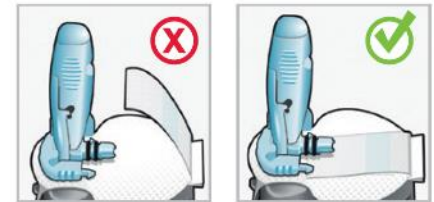

4



הכנס את החיישן למכשיר ההחדרה.
החזק את מכשיר ההחדרה בדיוק כפי
שמוצג, כאשר אגודלך מונח על טביעת
האגודל במכשיר ההחדרה. אל תחזיק
את כפתורי הצד. דחף את מכשיר
ההחדרה כלפי מטה אל המעמד עד אשר
בסיס מכשיר ההחדרה יגיע לשולחן.

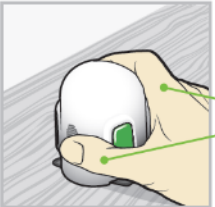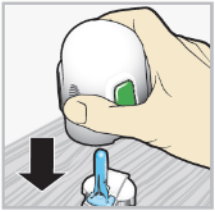

האצבעות אינן
נוגעות בכפתורי
הצד.

5

נתק את מכשיר ההחדרה מהמעמד.
כדי לנתק את מכשיר ההחדרה מהמעמד,
החזק את מכשיר ההחדרה כפי שמוצג,
כאשר אגודלך מונח על טביעת האגודל
במכשיר ההחדרה. בעזרת היד השנייה,
הנח שתי אצבעות על זרועות המעמד,
ומשוך לאט את מכשיר ההחדרה ישר
למעלה.

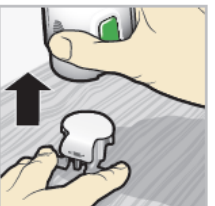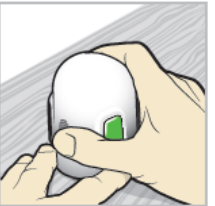


הערה: ודא שהמעמד מונח בצורה יציבה
על השולחן לפני שתמשוך את מכשיר
ההחדרה.

חיבור החיישן לגוף


6

מקם את מכשיר ההחדרה על גופך. החזק את מכשיר ההחדרה ביציבות כנגד מקום ההחדרה שניקית, מבלי לדחוף את מכשיר ההחדרה עמוק מדי לתוך העור.

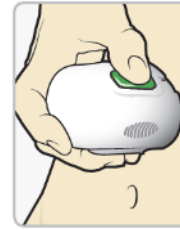

7

החדר את החיישן. לחץ ושחרר בו-זמנית את הבליטה בשני הכפתורים. אל תרחיק עדיין את מכשיר ההחדרה מהגוף.

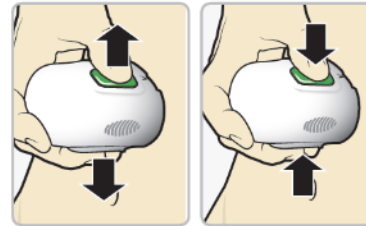


8

הדק את מכשיר ההחדרה לגוף. המשך להחזיק את מכשיר ההחדרה צמוד לגוף במשך חמש שניות לפחות, על מנת לאפשר למדבקה להיצמד לעור.




9

הסר את מכשיר ההחדרה מהגוף. משוך לאט את מכשיר ההחדרה הרחק מהעור, תוך הקפדה לא ללחוץ על הכפתורים.

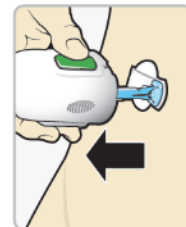

10

הסר את בית המחט. ביד אחת, החזק בעדינות את בסיס החיישן על העור. ביד השנייה, החזק את בית המחט בחלקו העליון, ומשוך אותו באיטיות הרחק מהחיישן. השלך את בית המחט אל פח המיועד לחפצים חדים.

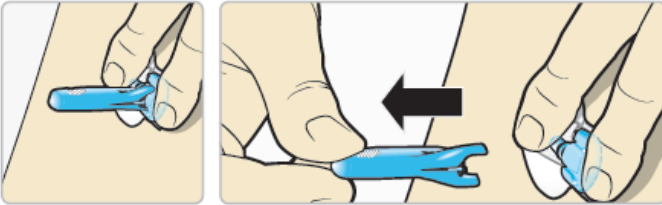


11

הסר את הנייר המגן מהמדבקה. החזק את החיישן במקומו והסר בעדינות את הנייר המגן הממוקם מתחת למדבקה. אל תסיר עדיין את הנייר המגן מהלשונית המלבנית של המדבקה.




12

לחץ על כל המדבקה כנגד העור. לחץ בחוזקה על המדבקה כנגד העור והחלק את כל המדבקה כדי שתידבק לעור.

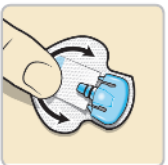


חיבור החיישן לגוף

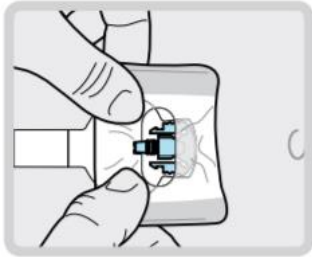

16 הנח את המדבקה כפי שמוצג שמוצג ולחץ עליה בחוזקה כלפי מטה.




13 משוך את לשונית המדבקה. משוך החוצה את לשונית המדבקה מתחת למחבר החיישן.

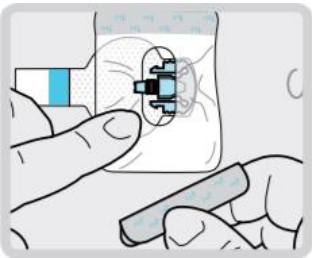


17 הסר את הנייר המגן 2 מכל צד.



14 ישר את לשונית המדבקה. ישר את לשונית המדבקה כך שתהיה צמודה לעור, אך אל תסיר עדיין את הנייר המגן.


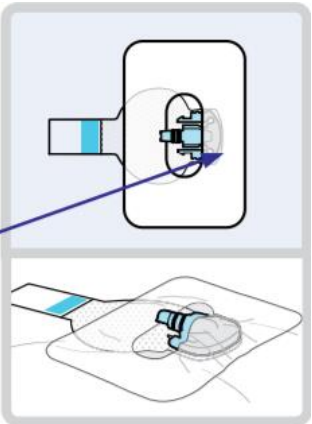


18 החלק את המדבקה.


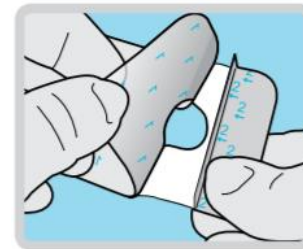


15 הסר את הנייר המגן 1

חיבור המשדר לחיישן – חיבור המשדר

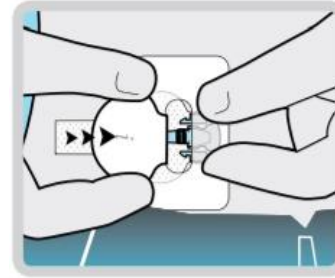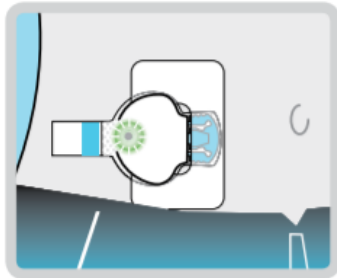


1 חבר את המשדר לחיישן.
המתן עד שנורת החיווי שעל המשדר
מפסיקה להבהב

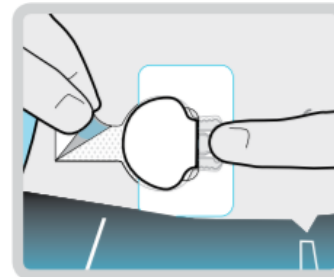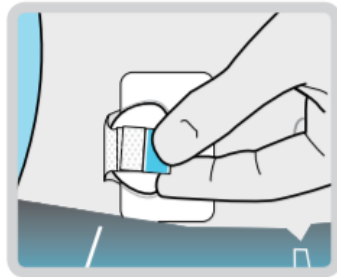

2 הסר את הנייר המגן מלשונית המדבקה.
כסה את המשדר בעזרת לשונית המדבקה.
אל תמשוך את הלשונית חזק מדי.

Option 1

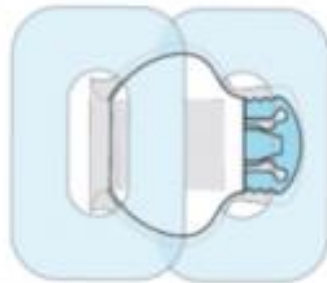

Option 2



3 ניתן להדביק מדבקה נוספת לחיזוק
החיישן באחד האופנים הבאים