

## ניקוי משדר ניטור סוכר רציף שלכם



## איך לנקות משדר ניטור סוכר רציף



**אם אין בידכם חלק מאביזרי הניקוי האלו.  
אל תנסו להחליפם בחומרי ניקוי אחרים.  
אנא בצעו אך ורק את השלבים שאתם  
מסוגלים לבצע**

1. שטפו את הידיים ביסודיות.
2. חברו את הטסטר למשדר, כשהצד השטוח של הטסטר והצד השטוח של המשדר פונים מטה. דחפו את הטסטר לתוך המשדר עד שהזרועות הגמישות שבצדדיו יתחברו למשדר. כשהטסטר מחובר בצורה טובה, האור הירוק שעל המשדר יהבהב 6 פעמים.
3. כשאתם אווזים בטסטר, הספיגו מטלית כותנה בתמיסת מסיר דבק רפואי, ושפשו בעדינות את כל שאריות הדבק עד שיוסרו לחלוטין.
4. שטפו את המשדר במי ברז בטמפרטורת החדר למשך דקה לפחות.
5. הכינו תמיסה של סבון נוזלי עדין על ידי ערבוב של כפית 1 של סבון נוזלי עדין וכוס מים 1. כשהטסטר עדיין מחובר, השרו בתוך התמיסה למשך דקה אחת.
6. הברישו את פני המשדר בעזרת מברשת שיניים בעלת סיבים עדינים.
7. שטפו את המשדר תחת מי ברז זורמים למשך דקה אחת לפחות, ועד שניקוי כל שאריות הסבון הנוזלי.
8. יבשו את המשדר ואת הטסטר בעזרת מטלית בד נקייה ויבשה, הניחו אותם על המטלית עד לייבוש מלא באוויר.
9. נתקו את הטסטר על ידי לחיצה עדינה על הזרועות הגמישות שבצדדיו.

## אספו את האביזרים הבאים



- סבון נוזלי עדין
  - מברשת שיניים בעלת סיבים עדינים
  - מיכל
  - מטלית יבשה ללא-סיבים
- אם אתם מעוניינים להסיר שאריות דבק מהמשדר תזדקקו גם למסיר דבק רפואי, ומטליות כותנה. אנו ממליצים לבצע את הניקוי רק לאחר הסרתו מהגוף ולפני חיבור חישן חדש.