

ניקוי משאבת האינסולין שלכם



איך לנקות את משאבת האינסולין



**אם אין בידכם חלק מאביזרי הניקוי האלו.
אל תנסו להחליפם בחומרי ניקוי אחרים.
אנא בצעו אך ורק את השלבים שאתם
מסוגלים לבצע**

1. שטפו את הידיים ביסודיות.
2. הספיגו פיסת בד במים מעורבבים עם מעט סבון.
3. השתמשו בפיסת הבד על מנת לנקות את חלקה החיצוני של המשאבה.
4. הספיגו פיסת בד במים נקיים והסירו כל שארית של סבון מהמשאבה.
5. נקו בעזרת פיסת בד יבשה.
6. נגבו את המשאבה בעזרת פד המכיל אלכוהול 70%.
7. השתמשו במקלון אוזניים נקי על מנת להסיר שאריות סוללה ממכסה הסוללה.
8. השתמשו במטלית נקייה ויבשה על מנת להסיר שאריות סוללה מתא הסוללה.

זהירות: לעולם אל תשמשו בממס אורגני, כמו: נוזל הצתה, מסיר לק או מדלל צבע. לעולם אל תשתמשו בקרמים וחומרי סיכה לניקוי המשאבה. שמרו על תא האינסולין וסוללה יבש והרחיקו מנוזלים. שימוש במוצרים מעלה עלול לגרום לנזק למשאבה, ועלול להוביל לפציעה קלה.

אספו את האביזרים הבאים



- 3-4 פיסות בד רכות ונקיות.
- מים מעורבבים עם מעט סבון
- מים נקיים
- אלכוהול 70%.
- מספר מקלוני אוזניים נקיים