

חיבור



5 איחזו במוליך ביציבות והסירו את המכסה הפלסטי.



4 הסירו את הנייר הסטרילי.



3 משכו את התגית הלבנה להסרת העטיפה.



2 נקו את העור באלכוהול או חומר חיסוי דומה. (המתינו עד שהעור מתייבש לחלוטין לפני שימוש בהתקן)



1 נא לשטוף את הידיים במים וסבון.



9 הניחו את המוליך על אזור ההחדרה והניחו את האצבעות בשקעים העגולים. לחצו על שני השקעים העגולים במקביל על מנת להחדיר את התקן ההזרקה.



8b הניחו את האצבעות על האזור המקווקו שבצדדי המוליך ומשכו מעלה ממרכז המוליך עד לניעילה במצב מתוח.



8a החזיקו כשהמחט פונה כלפי מטה.



7 סובבו והסירו את מגן המחט המובילה.



6 הסירו את פס הנייר ממשטח המדבקה.



12 הצמידו את המדבקה לעור.




11 אחזו במרכז המוליך בלבד, ומשכו בעדינות על מנת להסיר את התקן ההזרקה.




10 לחצו על מרכז המוליך על מנת לאבטח את התקן ההזרקה כלפי העור.

הכירו את ה- i-port Advance

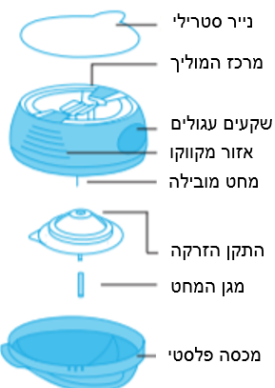

היכן לחבר?

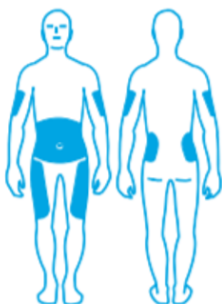

אזורי חיבור

משוך אך ורק ממרכז המוליך על מנת להסיר את המוליך מהתקן ההזרקה (ראה שלב 11)

טיפים מועילים

- לפני שימוש ב- i-port Advance זהה את ההבדל שבין ה"שקעים העגולים" וה"אזור המקווקו" על ידי סקירת "הכירו את ה- i-port Advance"

## שימוש



הוציאו את המזרק.



הזריקו באיטיות את התרופה.



נקבו את המחיצה על ידי המחט של המזרק.



נקו את המחיצה לפני כל שימוש.

## הסרה



אחזו בשולי משטח המדבקה והסירו

### ◀ האם אני יכול להשתמש בעט אינסולין עם i-Port Advance® ?

כן, ניתן להשתמש בעטי אינסולין עם i-Port Advance® כל עוד אורך המחט אינו עולה על 8 מ"מ או קטן יותר מ 5 מ"מ.

### ◀ האם אני יכול להשתמש במספר סוגי אינסולין עם אותו i-Port Advance® ?

ניתן להזריק את שני סוגי האינסולין (ארוך וקצר) דרך אותו התקן הזרקה כל עוד המתנתם 60 דקות בין ההזרקות. אנו ממליצים להזריק תמיד את האינסולין קצר הטווח קודם, עקב זמני הפעילות שלו.

### ◀ מה עליי לעשות עם רמת הסוכר בדמי גבוה באופן לא מוסבר לאחר הזרקה האינסולין דרך ה i-Port Advance® ?

במקרה של רמת סוכר גבוה בדם שאינה מוסברת, הסר את ה i-Port Advance® והחדר/י התקן חדש לאיזור אחר בגופך. יתכן שהקנולה שבגופך יצאה, התקפלה, או נחסמה באופן חלקי. במקרה שרמת הסוכר שבגופך נותרת גבוה,

- בעת הסרת התקן ההזלפה מהגוף, ניתן להשתמש בשמן תינוקות על מנת להקל על הסרת המדבקה.
- המידע המוצג כאן הינו מידע משלים למדריך למשתמש. קראו את המדריך למשתמש להוראות מלאות.
- למידע נוסף, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מדטרוניק בטלפון: 09-9724489